

# Veriforte™ med Oral - Schonende Mundspüllösung auf HOCl-Basis



mediset

## Die Technologie von Veriforte™ med Oral:

Veriforte™ med Oral besteht aus Wasser, Natriumchlorid, Natriumhypochlorit und Hypochlorsäure, welche durch eine einzigartige, besonders umweltfreundliche Technologie stabilisiert werden. Veriforte™ med Oral reduziert die mikrobielle Belastung durch die mechanische Wirkung des Spülens und verringert bei regelmäßiger Anwendung das Infektionsrisiko. Hierdurch wird ebenfalls eine schnelle Reduktion von Mundgeruch erzielt.


HOCl, mit ihrer konservierenden Eigenschaft, ist ein wesentlicher Inhaltsstoff von Veriforte™ med Oral. Sie ist eines der Endprodukte eines physiologischen Pfades in menschlichen weißen Blutkörperchen, die eindringende Krankheitserreger als Teil der natürlichen Reaktion bekämpft. Eine große Herausforderung bei der Herstellung von HOCl-Lösungen ist die Stabilität bei einem zugleich neutralen pH-Wert. Diese wird von Veriforte™ med Oral durch den einzigartigen Herstellungsprozess gewährleistet.

## Veriforte™ med Oral bietet viele Vorteile:

- > Keine Verfärbungen der Zähne
- > Kein Auftreten von Geschmacksstörungen oder Schleimhautveränderungen
- > Therapeutisch unbeschränkte Anwendungsdauer
- > Keine Reizung der Mundschleimhaut
- > Anwendbar bei freiliegenden Knochen
- > Kann im Abwasser entsorgt werden
- > Kein neurotoxisches oder zytotoxisches Risiko
- > Reduziert Mundgeruch
- > Spülzeit 30 Sekunden
- > Neutraler pH-Wert

## Die Wirkweise von Veriforte™ med Oral:

Veriforte™ med Oral umspült einzellige Mikroorganismen. Die hypochlorige Säure denaturiert die Zellwand und erhöht deren Permeabilität. Die hypotone Lösung sorgt dafür, dass zum Ausgleich des osmotischen Gefälles Wasser in die Zellen strömt. Durch den zunehmenden Zellinnendruck kommt es zum unspezifischen osmotischen Schock, durch den die Zellen platzen (Osmolyse).

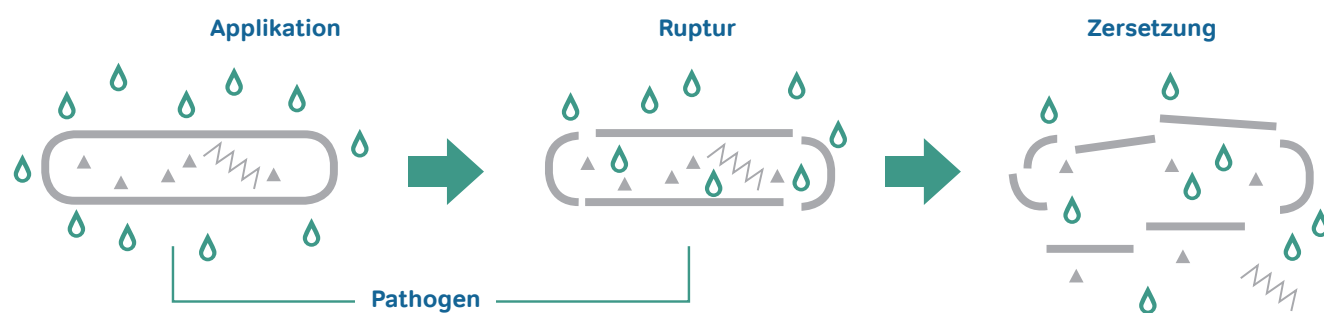

## Anwendung von Veriforte™ med Oral

Veriforte™ med Oral ist eine gebrauchsfertige, neutrale Lösung zur effektiven Spülung der Mundhöhle und des Rachenraumes. Das breite Anwendungsgebiet umfasst die Parodontologie, Endodontologie bis hin zu speziellen Anwendungen bei der Behandlung von Osteonekrose. Veriforte™ med Oral besteht aus H<sub>2</sub>O, NaCl, NaOCl und HOCl. Die Lösung beinhaltet keinen Alkohol und zeichnet sich durch eine besonders gute Verträglichkeit aus bei einem neutralen pH-Wert. Im Gegensatz zu vielen anderen Mundspüllösungen ist Veriforte™ Med zeitlich uneingeschränkt einsetzbar und führt auch bei langfristiger Anwendung zu keinerlei bekannten Nebenwirkungen, wie Verfärbungen von Zähnen und Zunge oder Geschmacksstörungen und Schleimhautveränderungen.

Das unbeabsichtigte Verschlucken kleinerer Mengen der Lösung ist unproblematisch. Die mikrobielle Belastung wird durch die mechanische Wirkung des Spülens reduziert und das Infektionsrisiko bei regelmäßiger Anwendung verringert. Hierdurch wird ebenfalls eine schnelle Reduktion von Mundgeruch erzielt.

### Applikation für Veriforte™ med Oral:

- > Zur Reinigung und Dekontamination der Mundhöhle und des Zahnfleisches
- > Um Beläge von der Zunge und den Zähnen zu entfernen
- > Zur Spülung vor und nach kieferchirurgischen Eingriffen und Zahnextraktionen
- > Bei Aphten und Zahnfleischverletzungen
- > Zur Reduktion von Mundgeruch

### Vielfältige Einsatzmöglichkeiten:

#### > Dentalbereich und Kieferchirurgie:

Nach Zahnextraktionen, bei Aphten, bei Zahnfleischverletzungen

#### > Intensivbereich:

Zur routinemäßigen Mundhygiene bei Intensivpatienten

#### > Geriatrie, Palliativstation:

Zur allgemeinen Mundhygiene und bei Problemen mit Zahnprothesen, die Druckstellen und Entzündungen verursachen

#### > Onkologie, Strahlentherapie:

Bei auftretenden Problemen mit der Mundhöhle

- > Weitere Informationen finden Sie im Bereich Download

