

WOUND CARE DryMax[®]

EASY

DryMax Easy ist eine sterile superabsorbierende Wundauflage und zur Behandlung von exsudierenden Wunden vorgesehen. DryMax Easy absorbiert Wundflüssigkeit und bindet sie im Verbandstoff. Die Wundflüssigkeit wird von der Auflage aufgesaugt und im Kern in Form eines Gels gespeichert, wodurch das Risiko von Mazeration (Aufweichung) minimiert und eine feuchte Wundumgebung beibehalten wird.


DryMax Easy

Die weiche Haftfunktion hilft der Wundauflage eigenständig an der Haut zu halten und unterstützt somit als „dritte Hand“ bei der Anlage des Sekundärverbands.


Das Design der Auflage ermöglicht die beidseitige Anwendung des Verbandstoffs in Richtung Wunde. Durch diese Eigenschaft wird auch das Aufeinanderschichten mehrerer Auflagen ermöglicht, sollte zusätzliche Absorptionskapazität benötigt werden. Die nahtlose Abdeckung erleichtert das Platziere über der Wunde.

Die Wundauflage bleibt trocken und komfortabel für die Patienten. Gleichzeitig trägt sie zu einer feuchten Wundumgebung bei. Die hydrophile Kontaktschicht leitet die Flüssigkeiten effektiv von der Wunde ab und verteilt sie gleichmäßig im ABSORBEST-Kern.


Die ultradünne und besonders weiche Beschaffenheit ermöglicht die Verwendung auf allen Körperteilen. DryMax Easy ist auch für die Kompressionstherapie geeignet.

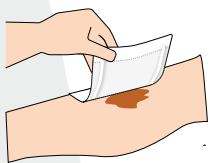

Die Auflage muss direkt auf der Wunde oder zusammen mit einem weiteren geeigneten Verbandstoff platziert werden.

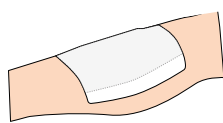

Sichern Sie die Wundauflage mit einer geeigneten Bandage, einem Tape- oder Klebeverband.

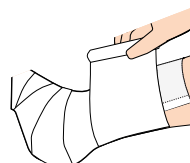

DryMax Easy kann in Verbindung mit Kompressionstherapie angewendet werden.


DAS PRODUKTSORTIMENT VON DRYMAX EASY

Artikel	REF	PZN	Stk./ Schachtel	Maße (cm)	Absorptionskapazität*
DryMax Easy 10x10 cm	F60033/10	14357361	10	10x10	170 ml
DryMax Easy 10x20 cm	F60035/10	14357378	10	10x20	500 ml
DryMax Easy 20x20 cm	F60036/10	14357384	10	20x20	1000 ml
DryMax Easy 20x30 cm	F60037/10	14357390	10	20x30	1550 ml

*) Gemäß der internationalen Norm EN 13726-1



- Kosteneffektiv
- Anwenderfreundlich
- Erhöhter Patientenkomfort
- Verbesserte Wundheilung

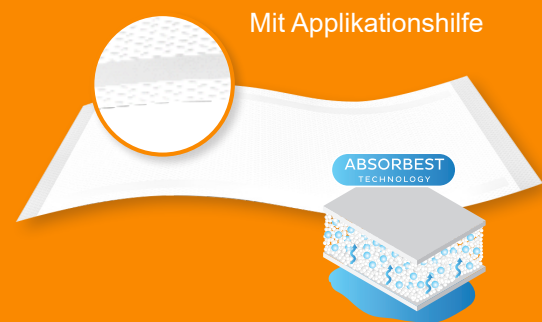

Ihr Vertriebspartner in Deutschland

mediset

clinical products
mediset clinical products GmbH

Telefon: +49 (0)2104 - 3 68 32
Telefax: +49 (0)2104 - 3 68 95

E-Mail: info@mediset.de
Internet: www.mediset.de

Spenglerallee 12-14
04442 Zwenkau
Industriestr. 26
40822 Mettmann

ABSORBEST

Manufactured by Absorbest AB Sweden
www.absorbest.se | info@absorbest.se