

Absorbest Super Foam


Absorbest Super Foam ist eine Wundauflage zur Behandlung von exsudierenden Wunden. Es ist ein steriler Polyurethanschaumverband, ergänzt um die Exsudatsmanagement-Eigenschaften einer superabsorbierenden Wundauflage. Die Auflage hat eine sanft haftende Kontaktoberfläche zur vereinfachten Applikation.

Absorbest Super Foam ist eine dünne, diskrete Wundauflage, die sowohl kleinere wie auch größere Mengen an Wundexsudat handhaben kann. Die Auflage schließt Wundexsudat effizienter im Inneren ein, als herkömmliche Schaumverbände dies könnten, und ist zudem auch für besonders zähflüssiges Wundsekret geeignet.


Die umgebende Haut wird vor Mazeration geschützt, während zugleich ein optimal-feuchtes Wundmilieu erzeugt wird. Das Wundexsudat wird effektiv aus der Wunde und in den DryMax-Kern fortgeleitet. Absorbest Super Foam absorbiert sicher Wundsekret, welches Bakterien und andere schädliche Substanzen enthält.

Eine sanft haftende Beschichtung bedeckt die Wundkontaktfläche. Diese vereinfacht die Applikation und dient dem Pflegenden als helfende Hand. Die sanfte Haftung ermöglicht eine Umpositionierung und bietet eine schonende Oberfläche beim Verbandswechsel.


Anwendungsleitfaden

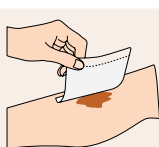

Die Wundauflage direkt auf der Wunde – eventuell zusammen mit einem weiteren geeigneten Verbandstoff – platzieren.

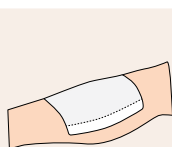

Die Wundauflage mit einer geeigneten Bandage, einem Tape oder einem Klebeverband fixieren.

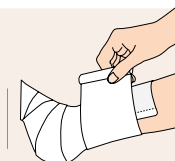

Absorbest Super Foam kann in Kombination mit einer Kompressionstherapie angewendet werden.

Artikel	Maße (cm)	REF	Stk./ Schachtel	Absorptions- kapazität*	PZN
Absorbest Super Foam	7,5x7,5	F60041/10	10	60 ml	19635600
Absorbest Super Foam	10x10	F60043/10	10	130 ml	19635617
Absorbest Super Foam	15x15	F60044/10	10	350 ml	19635623
Absorbest Super Foam	10x20	F60045/10	10	350 ml	19635646
Absorbest Super Foam	20x20	F60046/10	10	640 ml	19635652

* Gemäß der internationalen Norm EN 13726

** Im Vergleich zu traditionellen Wundauflagen (G. Hoglin and H. Freijd, "A COHORT Study to investigate the benefit of the use of DryMax EXTRA superabsorbent Wound Dressing on a population of wet wounds," in Wounds UK Wound Care Conference, Harrogate, 2011)



- **Kosteneffizient**
- **Anwenderfreundlich**
- **Hoher Tragekomfort**
- **Verbessert Wundheilung****



DryMax® technology

Ihr Vertriebspartner in Deutschland

mediset
clinical products

mediset clinical products GmbH

Poststraße 15
D-04158 Leipzig
E-Mail: info@mediset.de

Telefon: +49 (0)341 - 25 35 21-0
Telefax: +49 (0)2104 - 3 68 95
www.mediset.de

 **Absorbest**

Hergestellt von Absorbest AB in Kisa,
Schweden
www.absorbest.de | info@absorbest.de