

DryMax® Soft

DryMax Soft ist eine sterile superabsorbierende Wundauflage und zur Behandlung von exsudierenden Wunden vorgesehen.


DryMax Soft absorbiert Wundflüssigkeit und bindet sie im Verbandstoff. Die Wundflüssigkeit wird von der Auflage aufgesaugt und im Kern in Form eines Gels gespeichert, wodurch das Risiko von Mazeration (Aufweichung) minimiert und eine feuchte Wundumgebung beibehalten wird.

DRYMAX SOFT


Die nahtlose Abdeckung erleichtert das Platzieren über der Wunde. Das Design der Auflage ermöglicht die beidseitige Anwendung des Verbandstoffs in Richtung Wunde. Durch diese Eigenschaft wird auch das Aufeinanderstapeln mehrerer Auflagen ermöglicht, sollte zusätzliche Absorptionskapazität benötigt werden.

Die Wundauflage bleibt trocken und komfortabel für die Patienten. Gleichzeitig trägt sie zu einer feuchten Wundumgebung bei. Die hydrophile Kontaktschicht leitet die Flüssigkeiten effektiv von der Wunde ab und verteilt sie gleichmäßig im ABSORBEST-Kern.


Die ultradünne und besonders weiche Beschaffenheit ermöglicht die Verwendung auf allen Körperteilen. DryMax Soft ist auch für die Kompressionstherapie geeignet.

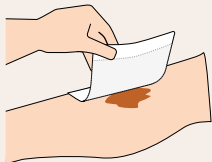

Die Auflage muss direkt auf der Wunde oder zusammen mit einem weiteren geeigneten Verbandstoff platziert werden.

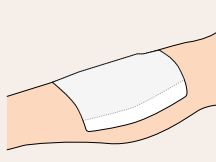


Sichern Sie die Wundauflage mit einer geeigneten Bandage, einem Tape- oder Klebeverband.

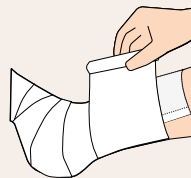

DryMax Soft kann in Verbindung mit Kompressionstherapie angewendet werden.



- **Kosteneffektiv**
- **Anwenderfreundlich**
- **Erhöhter Patientenkomfort**
- **Verbesserte Wundheilung**

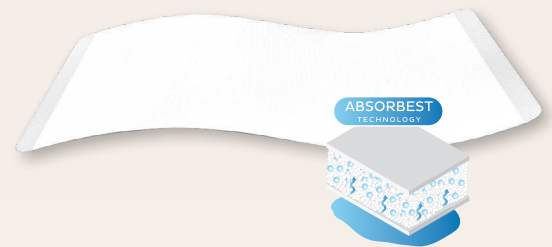

DAS PRODUKTSORTIMENT VON DRYMAX SOFT

Artikel	REF	PZN	Stk./ Schachtel	Maße (cm)	Absorptions- kapazität*
DryMax Soft 5x5 cm	F60125/10	19547445	10	5x5	25 ml
DryMax Soft 7,5x7,5 cm	F60011/10	14360765	10	7,5x7,5	60 ml
DryMax Soft 7,5x7,5 cm	F60011/25	14360771	25	7,5x7,5	60 ml
DryMax Soft 10x10 cm	F60013/10	12869393	10	10x10	130 ml
DryMax Soft 10x10 cm	F60013/25	13422139	25	10x10	130 ml
DryMax Soft 12,5x12,5 cm	F60123/10	20386585	10	12,5x12,5	220 ml
DryMax Soft 10x20 cm	F60015/10	12869401	10	10x20	330 ml
DryMax Soft 10x20 cm	F60015/25	13422145	25	10x20	330 ml
DryMax Soft 20x20 cm	F60016/10	12869418	10	20x20	600 ml
DryMax Soft 20x20 cm	F60016/25	13422151	25	20x20	600 ml
DryMax Soft 20x30 cm	F60017/10	12869424	10	20x30	960 ml
DryMax Soft 20x30 cm	F60017/25	13422168	25	20x30	960 ml
DryMax Soft 37x56 cm	F60019/10	14360788	10	37x56	3000 ml

Ihr Vertriebspartner in Deutschland

mediset
clinical products

mediset clinical products GmbH

Telefon: +49 (0)341 - 25 35 21-0 Poststr. 15
Telefax: +49 (0)2104 - 3 68 95 04158 Leipzig

E-Mail: info@mediset.de
www.mediset.de

Absorbest

Manufactured by Absorbent AB Sweden
www.absorbent.se | info@absorbent.se



*) Gemäß der internationalen
Norm EN 13726-1