

PolyMem®-Produktübersicht

PolyMem® / PolyMem® MAX Wund-Pad mit selbstklebender PU-Folie

	Art.-Nr.	Größe	Wundkissen	Verpackung	PZN
	203	5 x 5 cm	2,5 x 2,5 cm	5 x 20 St./VE	02919842
	405	10 x 13 cm	5 x 8 cm	4 x 15 St./VE	00045184
Max	606	13 x 13 cm	9 x 9 cm	4 x 15 St./VE	15885085
Max	3412	30 x 9 cm	26 x 5 cm	1 x 12 St./VE	15885091

PolyMem® Wund-Pad mit selbstklebendem Fixier-Vlies

	7203	5 x 5 cm	2,5 x 2,5 cm	5 x 20 St./VE	02919919
	7405	10 x 13 cm	5 x 8 cm	4 x 15 St./VE	00045238
	7606	15 x 15 cm	9 x 9 cm	4 x 15 St./VE	00045244
	7031	8 x 2,5 cm	2,5 x 2,5 cm	5 x 20 St./VE	02919954
	7042	10 x 5 cm	4 x 5 cm	5 x 20 St./VE	00239445
Silber	1766	15 x 15 cm	9 x 9 cm	2 x 15 St./VE	02811122

PolyMem® nichtklebendes Wund-Pad






	5022	5 x 5 cm	5 x 5 cm	5 x 20 St./VE	07590660
	5033	8 x 8 cm	8 x 8 cm	4 x 15 St./VE	00045356
	5044	10 x 10 cm	10 x 10 cm	4 x 15 St./VE	00045362
	5055	13 x 13 cm	13 x 13 cm	2 x 15 St./VE	00045379
	5077	17 x 19 cm	17 x 19 cm	2 x 15 St./VE	00045385
	5124	10 x 32 cm	10 x 32 cm	1 x 12 St./VE	00960177
	5244	10 x 61 cm	10 x 61 cm	2 x 4 St./VE	00045416
	5824	20 x 60 cm	20 x 60 cm	1 x 2 St./VE	02258754
Silber	1022	5 x 5 cm	5 x 5 cm	5 x 20 St./VE	05389959
Silber	1044	10 x 10 cm	10 x 10 cm	2 x 15 St./VE	02811300
Silber	1077	17 x 19 cm	17 x 19 cm	1 x 15 St./VE	02671655
Silber	1124	10 x 32 cm	10 x 32 cm	1 x 12 St./VE	02671661

PolyMem® MAX nichtklebendes Wund-Pad

	5035	8 x 8 cm	8 x 8 cm	4 x 10 St./VE	10837058
	5045	11 x 11 cm	11 x 11 cm	2 x 10 St./VE	03367876
	5088	20 x 20 cm	20 x 20 cm	2 x 5 St./VE	00151101
Silber	1045	10 x 10 cm	10 x 10 cm	2 x 8 St./VE	04923411
Silber	1088	20 x 20 cm	20 x 20 cm	2 x 5 St./VE	00151093

PolyMem® WIC Füll-Pad

	5731	2,5 x 8 cm	2,5 x 8 cm	5 x 14 St./VE	09266484
	5733	8 x 8 cm	8 x 8 cm	4 x 10 St./VE	00045439
	5712	8 x 30 cm	8 x 30 cm	1 x 12 St./VE	03508839
	5788	20 x 20 cm	20 x 20 cm	2 x 5 St./VE	07590648
Silber	1331	2,5 x 8 cm	2,5 x 8 cm	5 x 14 St./VE	05389965
Silber	1333	8 x 8 cm	8 x 8 cm	2 x 10 St./VE	02811292
Silber	1814	1 x 35 cm	1 x 35 cm	2 x 6 St./VE	00156943
Silber	1788	20 x 20 cm	20 x 20 cm	2 x 5 St./VE	08468228

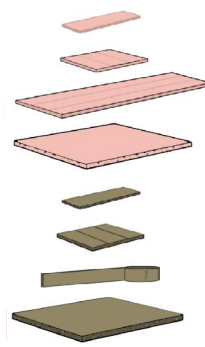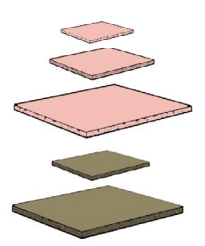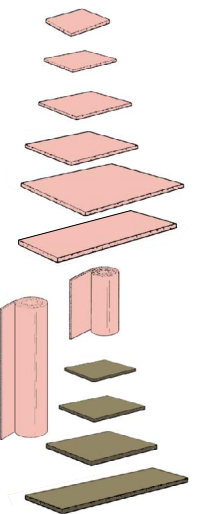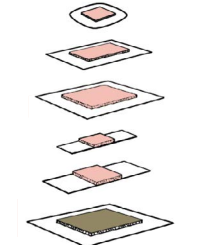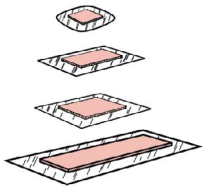

PolyMem® Shapes

Art.-Nr.		Größe	Wundkissen	Verpackung	PZN
3709	Sacral	18 x 20 cm	11 x 12 cm	2 x 10 St./VE	02671891
8023	Oval	5 x 7,5 cm	2,5 x 5 cm	5 x 20 St./VE	02671690
8053	Oval	9 x 13 cm	5 x 7,5 cm	2 x 15 St./VE	02671721
8086	Oval	17 x 21 cm	10 x 14,5 cm	2 x 10 St./VE	02671744
1709	Sacral Silber	18 x 20 cm	11 x 12 cm	2 x 10 St./VE	02671885
1823	Oval Silber	5 x 7,5 cm	2,5 x 5 cm	5 x 20 St./VE	02671709
1853	Oval Silber	9 x 13 cm	5 x 7,5 cm	2 x 15 St./VE	02671738
1886	Oval Silber	17 x 21 cm	10 x 14,5 cm	2 x 10 St./VE	02671879

PolyMem® Silicone Border

2823	Oval	5 x 7,5 cm	2,5 x 5 cm	5 x 10 St./VE	19100483
2835	Oval	9 x 13 cm	5 x 7,5 cm	5 x 5 St./VE	19100508
2868	Oval	16,5 x 21 cm	10 x 14,5 cm	4 x 5 St./VE	19100514
1283	Oval Silber	5 x 7,5 cm	2,5 x 5 cm	5 x 10 St./VE	19251673
1285	Oval Silber	9 x 13 cm	5 x 7,5 cm	5 x 5 St./VE	19251650
1288	Oval Silber	16,5 x 21 cm	10 x 14,5 cm	4 x 5 St./VE	19251667

PolyMem® Shapes Pre-Cut

5335	Tube	9 x 9 cm	9 x 9 cm	2 x 15 St./VE	00045422
------	------	----------	----------	---------------	----------

Nursicare® - therapeutische Stilleinlagen

400	Nursicare	6,4 cm	6,4 cm	10 x 6 St./VE	13581903
-----	-----------	--------	--------	---------------	----------

PolyMem® Wundverband für Finger und Zehen

Art.-Nr.		Umfang	Durchmesser	Verpackung	PZN
4401	Gr. 1 (XS)	4,7 - 5,7 cm	1,3 cm	5 x 6 St./VE	09063752
4402	Gr. 2 (S)	5,7 - 6,7 cm	1,8 cm	5 x 6 St./VE	09063775
4403	Gr. 3 (M)	6,7 - 7,7 cm	2,2 cm	5 x 6 St./VE	09063781
4404	Gr. 4 (L)	7,7 - 8,8 cm	3,2 cm	5 x 6 St./VE	10143887
4405	Gr. 5 (XL)	8,8 - 9,8 cm	3,8 cm	5 x 6 St./VE	10143918
1401	Gr. 1 Silber (XS)	4,7 - 5,7 cm	1,3 cm	5 x 6 St./VE	09221990
1402	Gr. 2 Silber (S)	5,7 - 6,7 cm	1,8 cm	5 x 6 St./VE	09222009
1403	Gr. 3 Silber (M)	6,7 - 7,7 cm	2,2 cm	5 x 6 St./VE	09222015
1404	Gr. 4 Silber (L)	7,7 - 8,8 cm	3,2 cm	5 x 6 St./VE	10143930
1405	Gr. 5 Silber (XL)	8,8 - 9,8 cm	3,8 cm	5 x 6 St./VE	10143947

Ihr Vertriebspartner in Deutschland

mediset
clinical products
mediset clinical products GmbH



Poststraße 15
04158 Leipzig

Telefon: +49 (0)341 - 25 35 21-0
Telefax: +49 (0)2104 - 3 68 95

E-Mail: info@mediset.de
www.mediset.de

US 02_2026

PolyMem®

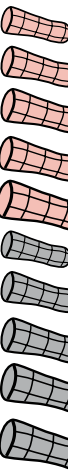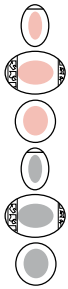



PolyMem®

Damit Wunden endlich heilen!

Multifunktionale polymere
Membranverbände



Nur bei
PolyMem®:
Einzigartiger
Wundverband
für Finger
& Zehen

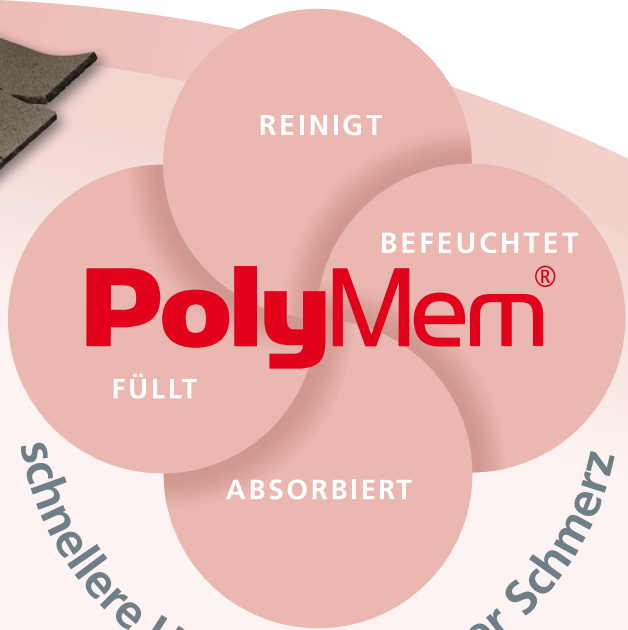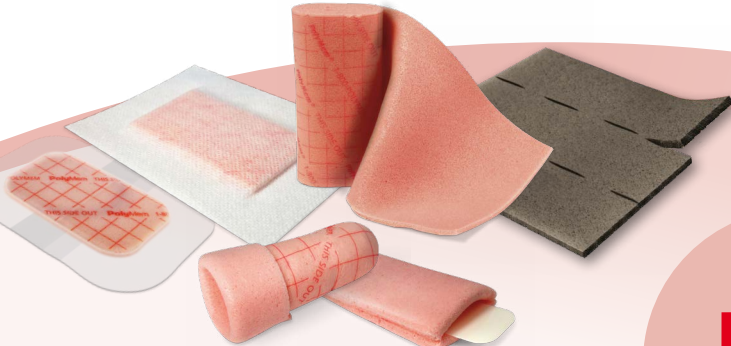

Unmittelbare
Schmerzlinderung



Aktive Förderung
des Wundheilungsprozesses



Einzigartige Rezeptur
schafft ein optimales Wundmilieu



PolyMem®-Wundauflagen fördern aktiv den Wundheilungsprozess

Was unterscheidet PolyMem® von anderen Wundauflagen?

PolyMem® bringt einzigartige Vorteile für Patienten und Wundversorger.

Im Gegensatz zu anderen Schaumverbänden, deren vorwiegender Zweck es ist, Wundexsudat zu absorbieren und Wunden abzudecken, sind PolyMem®-Wundauflagen dafür entworfen worden, den Heilungsprozess zu beschleunigen, Schmerzen zu lindern und Entzündungen zu reduzieren. Jede PolyMem®-Wundauflage enthält eine hydrophile Polyurethan-Matrix mit einem milden, gewebeschonenden Wundreiniger, einem sanften Befeuchter, einem Superabsorber sowie eine semipermeable Folienrückseite. Diese Kombination von Inhaltsstoffen arbeitet synergetisch für einen optimierten Wundheilungsprozess.



Schnellere Heilung...



Wundreinigung

PolyMem®-Wundauflagen reinigen permanent das Wundbett durch einen integrierten milden, nicht-ionischen, nicht-toxischen Wundreiniger (F68, Poloxamer). Der Wundreiniger in der Auflage reduziert die Notwendigkeit für manuelle (und oft schmerzhaft) Wundbettreinigungen beim Verbandswechsel, während er gleichzeitig ein effektives autolytisches Debridement fördert, welches eine hervorragende Alternative zu schmerzhafteren Debridement-Optionen darstellt.



Feuchthalten der Wunde

PolyMem®-Wundauflagen enthalten einen Wundbefeuchter (Glycerin), der dabei hilft, dass der Verband nicht mit der Wunde verklebt. Das Wundbett wird zudem während eines Verbandswechsels nicht gestört, da PolyMem®-Auflagen nichthaftend sind.



Exsudatmanagement:

PolyMem® saugt bis zum Zehnfachen seines Eigenwichts an Flüssigkeit auf (PolyMem® MAX und WIC bis zum Fünfzehnfachen). Überschüssiges Wund-Exsudat wird aus der Wunde entfernt und im Pad gespeichert.

Multifunktionale polymere Membranverbände für schnellere Heilung und weniger Schmerzen

Die Wundauflagen der PolyMem®-Produktfamilie können als Primärverband, Sekundärverband oder als Kombination aus beidem, während des gesamten Wundheilungsprozesses verwendet werden. Arten von PolyMem®-Wundauflagen sind erhältlich für trockene, geringfügig oder mäßig sowie stark exsudierende Wunden. PolyMem®-Wundauflagen verkleben nicht mit dem Wundbett. Sie können eine Wunde effektiv reinigen, auffüllen, Wundsekret aufsaugen und während des Heilungsprozesses feucht halten.



...weniger Schmerz



Schmerzlinderung

Durch die Aufnahme von Natrium-Ionen aus der Haut, setzt PolyMem® einen osmotischen Prozess in der Haut in Gang, der die Nozizeptoren blockiert und dadurch verminderte Schmerzempfindungen an das Gehirn sendet. Der Patient erfährt durch das aktivierte PolyMem® eine direkte Schmerzlinderung.



Entzündungshemmung

PolyMem®-Auflagen bringen oft Erleichterung bei persistentem Wundschmerz oder Schmerz, welcher durch Aktivität im wundumgebenden Bereich ausgelöst wird. Dies liegt insbesondere an den Eigenschaften der Auflage, dem Entzündungsprozess entgegenzuwirken.



Infektionsrisiko senken

PolyMem® ist speziell dafür entwickelt worden, Entzündungen dort zu fokussieren, wo diese sich entwickeln – in der Wunde. Dies hilft, Schwellungen und Schmerzen zu reduzieren, wodurch das Infektionsrisiko gesenkt und der Heilungsprozess unterstützt wird.

Die Produktfamilie von PolyMem®

Die PolyMem® Wundauflagen vereinfachen die Wundbehandlung, sind für alle Wundarten geeignet und können während des gesamten Heilungsprozesses eingesetzt werden. PolyMem® ist in verschiedenen Produkt-Ausführungen erhältlich, um optimale Heilbedingungen in allen Wundheilungsphasen gewährleisten zu können.

PolyMem® Silber - für die Versorgung infizierter Wunden


Um eine optimale Versorgung für bereits infizierte Wunden zu gewährleisten, gibt es alle gängigen Größen und Arten von PolyMem®-Wundauflagen ebenfalls in einer Silber-Variante; mit kleinsten Silberpartikeln, welche im Schaumstoff des Verbandes wirken und dabei Mikroorganismen zuverlässig abtöten. Es wird dabei kein Silber in die Wunde abgegeben (PolyMem Silber ist ebenfalls ein Medizinprodukt Klasse IIb).

PolyMem® ist u.a. auch erhältlich:



als PolyMem® WIC Füll-Pads

- > für Kavitäten und Wundtunnel
- > absorbiert bis zum 15-fachen des Eigengewichts
- > auch mit Perforation erhältlich, leicht teilbar
- > auch als antimikrobieller Membranverband Silber

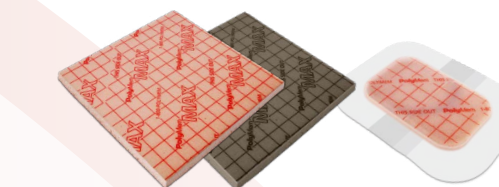


als PolyMem® MAX Wund-Pads

- > für erhöhte Exsudataufnahme
- > auch mit selbstklebender PU-Folie erhältlich
- > auch als antimikrobieller Membranverband Silber

als PolyMem® Finger- und Zehen-Verband, einfacher & schmerzärmer Verbandswechsel

- > kein Verkleben mit der Wunde
- > einfaches schmerzarmes Aufrollen
- > die Polsterung bietet mechanischen Schutz
- > kein Sekundärverband notwendig
- > auch als antimikrobieller Membranverband Silber

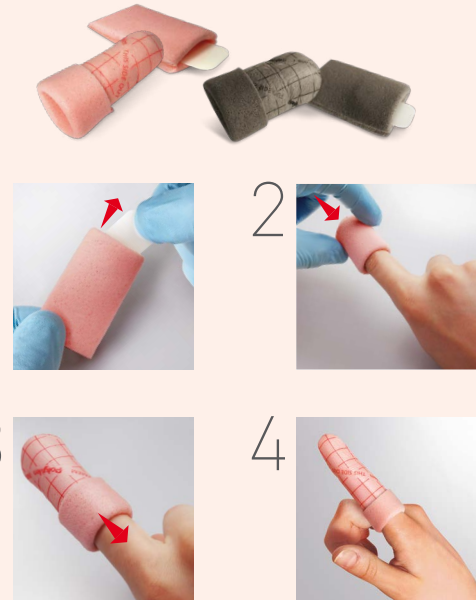

Es ist zu berücksichtigen, dass die volle Wirkung von PolyMem® nur in Verbindung mit der Zugabe von Feuchtigkeit (z. B. Wundflüssigkeit) erreicht wird. Für den Fall, dass die Wunde / Hautverletzung kein Exsudat abgibt (z.B. bei Hämatomen), sollte das PolyMem® Pad leicht angefeuchtet werden (z.B. mit Veriforte med Wundspüllösung oder NaCl-Lösung).