

Forma Foam

Soft

mediset
clinical products

Ein Hybrid-Verband aus Polyurethan-Schaum & Alginat

Vereint die Vorteile zweier bewährter Systeme




Hydrophiler Polyurethan-Schaum

Vorteile eines Polyurethan-Schaums

Im Gegensatz zu herkömmlichen Alginat-Auflagen hinterlässt **FormaFoam Soft** keine Rückstände auf der Wunde und ermöglicht einen besonders leichten und schmerzarmen Verbandwechsel, durch welchen neu entstandenes Granulationsgewebe nicht beschädigt wird.

FormaFoam Soft ist besonders weich und flexibel. Die silikonbeschichtete Unterseite sorgt für eine sanfte Haftung. Dadurch ist **FormaFoam Soft** auch besonders geeignet für schwer zu versorgende Körperstellen oder Stellen, die häufiger Bewegung ausgesetzt sind.

**SANFT
HAFTEND**
durch Silikon-
beschichtung

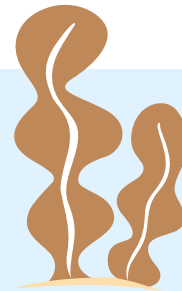


Natrium-Alginat

Vorteile von Natrium-Alginat

FormaFoam Soft enthält wasserlösliches Natrium-Alginat, das aus Braunalgen gewonnen wird. Dadurch verfügt **FormaFoam Soft** über ein höheres Absorptionsvermögen als reine Polyurethan-Schäume. Sobald Blut oder Exsudat in die Auflage eindringt, interagiert das Natrium-Alginat mit der Flüssigkeit. Das Alginat wird aufgelöst und bildet unter Zuzug von Calcium aus dem Wundbett ein Gel im Verband, das die Flüssigkeit fest im Inneren bindet und so u. a. für einen blutstillenden Effekt sorgt.

Das Natrium-Alginat agiert zudem als Schutzmembran in der Auflage und sorgt für einen optimalen Feuchtigkeitsausgleich.

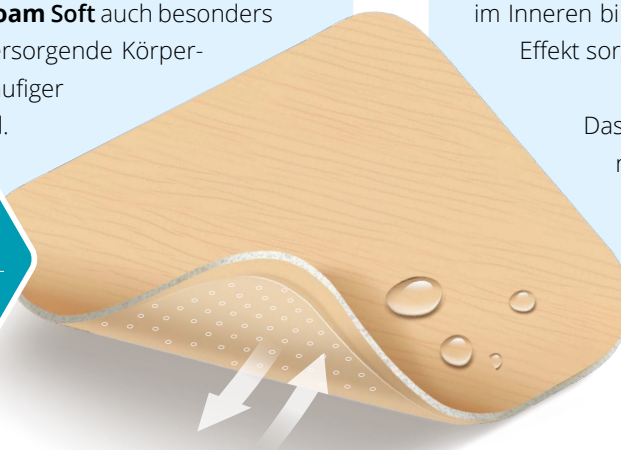

FormaFoam Soft Eigenschaften
des Polyurethan-Schaums:

- › Kein Verkleben mit dem Wundbett
- › Hautschonende, sanfte Silikonhaftung
- › Atmungsaktiv & hydrophil
- › Besonders weich und flexibel

FormaFoam Soft Eigenschaften
des enthaltenen Natrium-Alginats:

- › Verstärktes Absorptionsvermögen
- › Blutstillender Effekt
- › Schafft ein optimal-feuchtes Wundmilieu
- › Minimiert das Risiko der Mazeration

Forma Foam

Soft

mediset
clinical products

Aufbau & Funktionsweise

› Die keimundurchlässige Außenschicht



Die atmungsaktive keim- und wasserdichte Folie verhindert das Eindringen von Bakterien und hält das feuchte Wundmilieu aufrecht.

› Die absorbierende Schicht

enthält im hydrophilen Schaum zusätzlich Natrium-Alginat um mehr Exsudat aufzunehmen. Der Austausch von Natrium- und Calciumionen im Verband sorgt für die Bildung eines Gels, in welchem das Exsudat sicher gebunden wird.

› Die sanfte Haftschiicht

besteht aus feinen Poren und leitet das Exsudat in die absorbierende Schicht des Polyurethanschaums. Die sanft haftende Silikonbeschichtung ermöglicht ein schmerzarmes Ablösen der Auflage, Schäden am Granulationsgewebe werden dadurch minimiert.

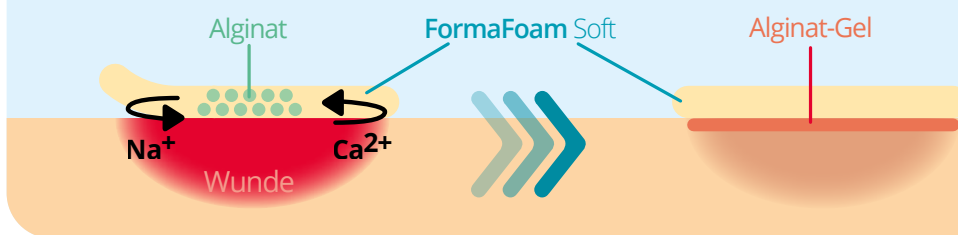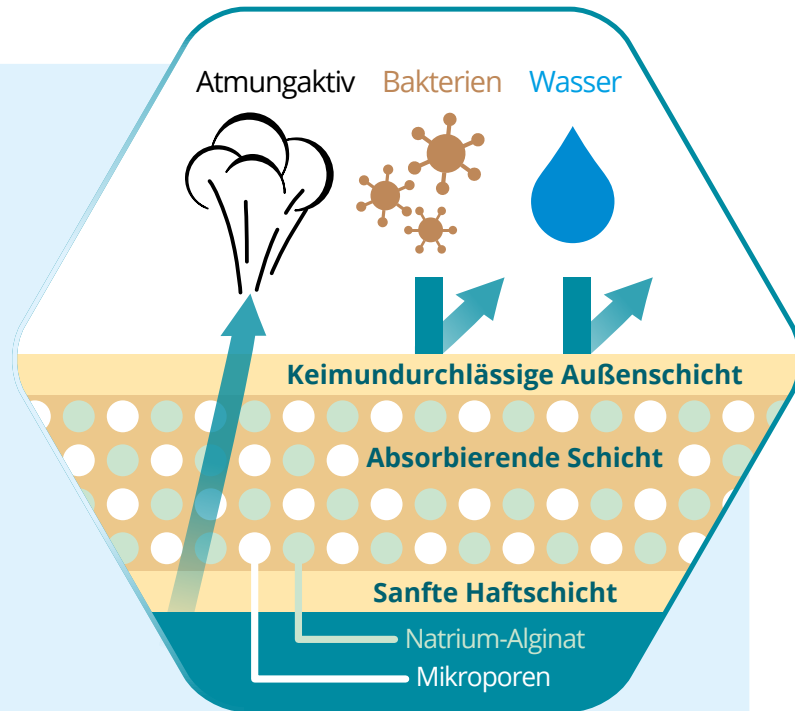

Bezeichnung	Art.-Nr.	Größe	PZN	VE
FormaFoam Soft	FFS0505	5 x 5 cm	11084135	10 Stück
FormaFoam Soft	FFS1010	10 x 10 cm	11084141	10 Stück
FormaFoam Soft	FFS1020	10 x 20 cm	11084164	10 Stück

mediset
clinical products

mediset clinical products GmbH

Poststraße 15
04158 Leipzig

Telefon: +49 (0)341 - 25 35 21-0
Telefax: +49 (0)2104 - 3 68 95

E-Mail: info@mediset.de
www.mediset.de

